

REF.233400

ECODIOL SPRAY PAE
Colis de 6 pulvérisateurs de 750 ml

Famille 510

Révision : 29/01/10

DEFINITION

ECODIOL SPRAY est un détergent désinfectant bactéricide, fongicide et virucide pour les surfaces, mobiliers et dispositifs médicaux de classe I (lits médicaux, fauteuils roulants, stéthoscopes, fauteuils de dentiste...) dans les milieux hospitalier, médical, paramédical,...

COMPOSITION

- Tensioactifs non ionique et anionique, alkylamine CAS n° 2372-82-9 (0,087% m/m),
- alcool isopropylique CAS n° 67-63-0 (0,15% m/m), complexants alcalins et parfum.
- Ne contient pas d'aldéhyde
- Ne contient pas d'ammonium quaternaire



CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|----------------|--------------------------|
| - Aspect | Liquide limpide incolore |
| - Odeur | Mentholée |
| - pH | 11 |

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

ECODIOL SPRAY est conforme aux normes :

Bactéricidie

- EN 1040, 1 minute, PV n° 226/0507
- EN 1040, 5min sur SARM (PV n° 129/0209-3)
- EN 13727, saletés, 15min (PV n° 401/1208/M-1)
- EN 14561, conditions de saleté, 15min sur *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae* (PV n° 357/0909-2/M-3)
- Actif sur SARM et Enterococcus faecium vancomycine résistant selon EN 13727, saletés, 15 min (PV n° 129/0209-2)
- NF T 72-151, spectre 4, PV n°346/0797-2 et sur Mycobacterium smegmatis PV n° 41 9/1097-3
- Actif sur Legionella pneumophila (NF T 72-151/301) PV n° 111/0101
- Actif sur Mycobacterium tuberculosis (NF T 72-151/301) PV n° 113/0198-3
- NF T 72-171 spectre 4, conditions de saleté, PV n° 2 86/0798
- EN 13697 bactéricidie, 5mn, conditions de saleté, PV n° 244/0502

REF.233400

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES (suite)

- EN 1276, conditions de saleté, PV n° 226/0507-3
- Actif sur Salmonella enterica ser.typhimurium T 72-300 selon NF T 72-170 conditions de saleté, PV n° 315/0800

Fongicidie

- NF T 72-201, PV n°346/0797-5, PV n°346/0797-6
- NF EN 1275, 15 mn, Candida albicans, PV n°226/0507-2
- NF EN 13624, 15 mn en conditions de saleté, Candida albicans (PV n° 129/0209)

Virucidie

- Actif sur le Rotavirus SA11 (selon NF T 72-180), PV n°399/1000-4
- Actif sur le virus H1N1 en 15 mn selon la méthodologie de la norme EN 14476 + A1 (PV n° 223/0509)

MODE D'EMPLOI

- Agiter avant utilisation
- Pulvériser à 40 cm des surfaces à désinfecter
- Essuyer

PRECAUTIONS

- Usage externe : ne pas avaler.
- Conserver dans son emballage d'origine entre 0 et 40°C pendant 2 ans.
- Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit

Ce produit contient de l'alcool, ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent.

CONDITIONNEMENT

- Colis de 6 pulvérisateurs de 750 ml